




Quick Guide Philips HeartStart HS-1 AED

Vervangen elektrodencassette

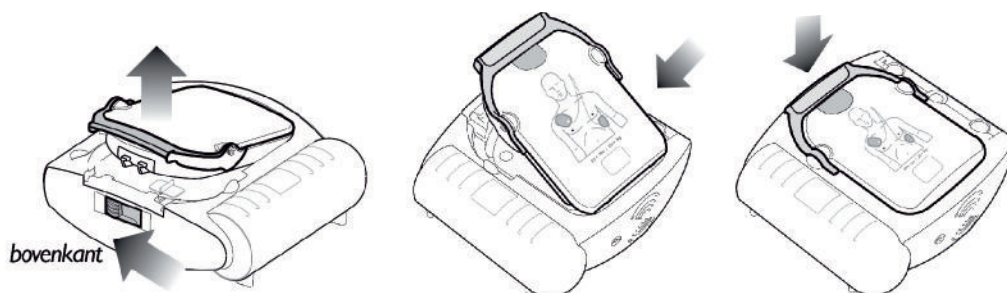

U kunt de cassette vervangen door de vergrendeling op de bovenrand van de defibrillator opzij te schuiven.


Steek de cassette in de cassetteopening aan de voorkant van de defibrillator. Als de cassette goed ingestoken is, hoort hij op zijn plaats te klikken.

Belangrijk:

Verwijder de afdichtfolie van de elektrodecassette alléén bij een daadwerkelijke inzet.

Dit om te voorkomen dat de kleefgel van de elektrode uitdroogt en de elektrode onbruikbaar raakt.

Vervangen batterij

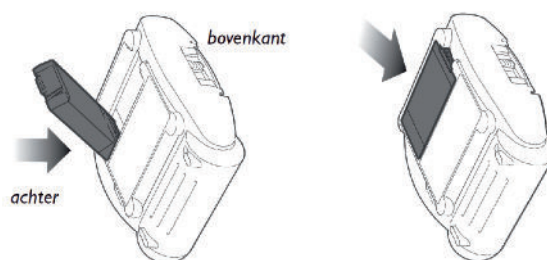

Haal de batterij uit de verpakking. Plaats hem in de batterijruimte aan de achterkant van de defibrillator. De HeartStart voert automatisch een zelftest uit zodra de batterij geïnstalleerd wordt.

Druk op de knipperende schokknop als daarom gevraagd wordt. Nadat de zelftest voltooid is, meldt de defibrillator de status en wordt u gevraagd op de groene aan/uit-knop te drukken als er een noodgeval is.

(Druk niet op de groene knop, tenzij er van een werkelijke noodsituatie sprake is.)

Vervolgens gaat de defibrillator uit en komt hij stand-by te staan. Het groene Klaar-lampje knippert om aan te geven dat de HeartStart gereed is voor gebruik.

Deze informatie wordt u aangeboden door BHVtotaal. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op: 0252 419 247